



ВОДОРОДНО-МЕТАНОВЫЙ ДЫХАТЕЛЬНЫЙ ТЕСТ С НАБОРОМ «СИБРТЕСТ» (ДИАГНОСТИКА СИНДРОМА ИЗБЫТОЧНОГО БАКТЕРИАЛЬНОГО РОСТА В ТОНКОЙ КИШКЕ - СИБР)

Название направляющего учреждения

Код направляющего учреждения

Фамилия врача

И.О. врача

Время взятия образца

Фамилия пациента

Дата взятия образца

Имя пациента

Отчество пациента

Дата рождения
пациента

Полный возраст
пациента

Пол пациента

МЕСТО ДЛЯ ШТРИХ КОДА

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

☐ **P732** СИБРТЕСТ - водородно-метановый дыхательный тест (диагностика синдрома избыточного бактериального роста в тонкой кишке)

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ ВСЕХ ПОЛЕЙ:

Федеральный округ

Область/Край/Республика

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ (отметить):

☐ Первичная диагностика ☐ Контроль эффективности лечения

АНАМНЕЗ. НАРУШЕНИЯ ОПОРОЖНЕНИЯ КИШЕЧНИКА (отметить):

☐ запоры ☐ поносы ☐ норма

ПРИ «КОНТРОЛЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ», НЕОБХОДИМО ОТМЕТИТЬ ПРИНИМАЕМЫЙ ПРЕПАРАТ:

- ☐ Ципрофлоксацин 500 мг x 2, 7-10 дней
 ☐ Амоксициллин 1000 мг x 2, 7-10 дней
 ☐ Метронидазол 500 мг x 2, 7-10 дней
- ☐ Норфлоксацин 400 мг x 2, 7-10 дней
 ☐ Рифаксимин 400 мг x 2, 7-10 дней
 ☐ Тинидазол 500 мг x 2, 7-10 дней
- ☐ Доксициклин 100 мг x 2, 7-10 дней
 ☐ Альфа Нормикс 400 мг x 2, 7-10 дней
 ☐ Тримедат (нормокинетик) 200 мг x 3, 30 дней
- ☐ Другой (вписать) _____

УКАЖИТЕ ОДИН ИЛИ НЕСКОЛЬКО СИМПТОМОВ, ПОЯВИВШЕГОСЯ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДЫХАТЕЛЬНОГО ТЕСТА

Наличие симптомов	Время взятия дыхательных проб (в минутах после приема препарата)							
	0 (до приема)	15	30	45	60	75	90	120
Нет								
Тошнота								
Изжога								
Отрыжка								
Урчание в животе								
Вздутие живота								
Боли в животе								
Диарея								
Слабость								
Головокружение								
Беспокойство								
Покалывание в конечностях								
Ощущения жара/холода								
Зуд								
Другое (указать)								

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ИЗМЕРЕНИЙ

Параметры	Время взятия дыхательных проб (в минутах после приема препарата)							
	0 (до приема)	15	30	45	60	75	90	120
H ₂ (ppm)								
CH ₄ (ppm)								
O ₂ / CO ₂ (%)								

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРУ БИОМАТЕРИАЛА:


исследуется восемь проб выдыхаемого воздуха (0 – до приема лактулозы и через 15, 30, 45, 60, 75, 90 и 120 минут после ее приема)

1. Открыть первый пакет для взятия проб выдыхаемого воздуха и снаружи расширить его дно. Пакет промаркировать наклейкой «0 минут», входящей в состав набора.





2. В этот пакет до дна вставить трубку для взятия проб.

3. Без предварительного глубокого вдоха задержать дыхание на 5-10 секунд, после чего выдохнуть первую порцию воздуха из ротовой полости в окружающую среду, затем через трубку в пакет медленно выдохнуть весь воздух до конца из легких.

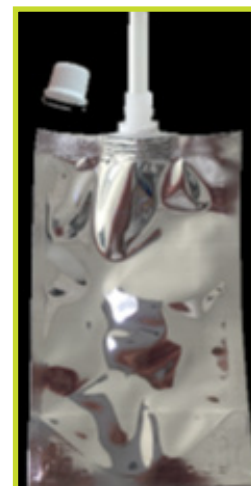

4. После извлечения трубки пакет с последней альвеолярной порцией выдыхаемого воздуха герметично закрутить крышкой. Наполнение пакета должно быть максимально возможным. Если после взятия пробы появляются сомнения в её правильности, можно извлечь весь воздух из пакета и повторить взятие пробы. Трубка остается для взятия следующих проб.

5. В направлении бланке в Листе регистрации дыхательных проб и симптомов отметить данные о пробе «0 минут» – столбец 0 (до приёма)»

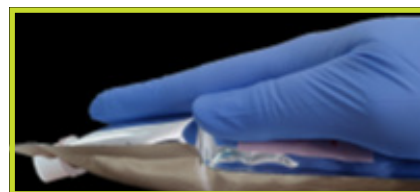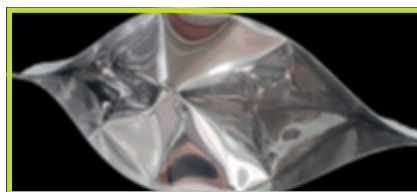

6. Открыть крышку флакона «СИБРТЕСТ» по часовой стрелке и добавить в содержимое флакона тёплую питьевую воду до отметки 200 мл и выдержать до полного растворения.

7. Дозы препарата:

- Доза для детей и взрослых одинаковая и составляет 10 г препарата (лактолозы), растворенных в 200 мл воды.
- Детям младшего возраста (5-7 лет) при затруднении, связанном с одномоментным приёмом 200 мл жидкости, дозу 10 г препарата можно развести в 100 мл воды.



8. Необходимо выпить весь раствор препарата.

Дальнейшее исследование проводится в спокойном состоянии в положении сидя.

9. Через 15, 30, 45, 60, 75, 90, 120 минут после приёма раствора «СИБРТЕСТ» осуществить взятие еще 7-ми проб выдыхаемого воздуха.

10. Пакеты с пробами промаркировать соответствующими заполненными наклейками «15 минут», «30 минут», «45 минут», «60 минут», «75 минут», «90 минут», «120 минут», входящими в состав набора.

11. Заполнить обязательные поля в бланке регистрации проб с описанием симптомов о наличии/отсутствии клинических проявлении во время каждой пробы.

12. Все пакеты необходимо отправить в лабораторию.

ВНИМАНИЕ:

Отклонение от фиксированного времени взятия проб должно быть не более 2 минут!

После неудачной попытки взять какую-либо пробу, можно выдавить воздух из пакета и взять пробу повторно.

Недопустимо взятие меньшего количества проб, чем 8.